

GENGIGEL®**FORTE**

Orální gel

Pro aplikaci na rány a při pooperačních stavech.

Jednoduché, rychlé a efektivní použití.

Kyselina hyaluronová s vysokou molekulovou hmotností (HMW) se koncentruje zejména ve vnějších vrstvách zdravé tkáně dásní, kde přispívá jak k bariérové funkci, tak k zajištění pevnosti periodontálních vazů. Kyselina hyaluronová je nezbytná pro udržení zdravých dásní a má řadu příznivých vlastností, čímž významně podporuje stomatologickou péči a ústní hygienu. Kyselina hyaluronová může absorbovat 50krát více vody, než je její vlastní suchá hmotnost. Důsledkem této vlastnosti, společně s molekulární konformací po rozpuštění ve vodném roztoku, působí kyselina hyaluronová jako velmi účinná přirozená bariéra proti pronikání mikroorganismů a dalších toxinů, které mohou přispívat ke vzniku parodontálních onemocnění. Díky ochranné bariérové funkci pomáhá Gengigel® Forte potlačovat bolest, podporuje přirozenou regeneraci tkání po traumatických stavech, jako je např. chirurgický zákrok, zavedení implantátů, extrakce zubů, odstranění zubního kamene atd., a podporuje absorpci vody, čímž snižuje otoky a zklidňuje zánětlivý proces.

Gengigel® Forte

- Obsahuje biotechnologicky vyrobenou, vysoce kvalitní a čistěnou kyselinu hyaluronovou (nepocházející ze zvířat) ve formě sodné soli s vysokou molekulovou hmotností.
- Má dlouhodobý lokální účinek.
- Je vysoce přilnavý díky unikátnímu složení.
- Může být používán bez omezení všemi pacienty, včetně dětí, těhotných žen, starších osob a diabetiků.

Indikace

Vzhledem ke svým vlastnostem je Gengigel® Forte indikován k ochraně sliznice v případech:

- hlubokého poranění dásní
- zanícených a/nebo bolestivých dásní po traumatech, chirurgických nebo periodontálních zákrocích, extrakcích zubů nebo po profesionálním odstranění zubního kamene.

Návod k použití

Ihned po stomatologickém zákroku naneste malé množství gelu na povrch postižené oblasti pomocí kanyly nebo (po umytí rukou) naneste prstem a jemně vmasírujte na dásně, aby byla pokryta celá postižená oblast gelem. Používejte jednou nebo dvakrát denně, případně dle potřeby, není-li Vaším lékařem nebo dentální hygienistkou doporučeno jinak.

Složení

Hlavní složka: hyaluronát sodný

Seznam pomocných látek: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Alcohol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Glycerophosphocholine, Sodium phosphate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Sodium hydroxide. (Může obsahovat kyselinu citrónovou).

Balení

Gengigel® Forte gel pro orální použití, tuba 8 ml.

Kontraindikace: použití přípravku Gengigel® Forte je kontraindikováno v případě přecitlivělosti na kteroukoli z obsažených složek.

Bezpečnostní opatření a varování: Nepoužívejte výrobek, pokud je viditelně poškozen.

Skladujte při pokojové teplotě; chráňte před přímými zdroji tepla. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Po použití očistěte tubu od zbytků gelu a pečlivě uzavřete.

Výrobek je určen pouze pro osobní použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud potíže, na které používáte přípravek Gengigel® Forte přetrvávají, poradte se s lékařem.

www.gengigel.cz**EMPOLAS**

Výhradní distributor pro ČR
EMPOLAS s.r.o.
Horní lán 9A, Olomouc 77900
www.empolas.com

**RICERFARMA** s.r.l.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU

G27202-008-00/D
Release April 2019

CE
0051